

# Seringue de gaz du sang *safePICO Aspirator* sans aiguille



**Avant le prélèvement :**  
Enlever la seringue du sachet  
Pousser le piston jusqu'à la butée

**Fig. 1**

**Tapoter le corps de la seringue** pour libérer les bulles d'air (seringue verticale)

**Fig. 5**

**Purger plusieurs fois le cathéter** et adapter la seringue sur le robinet  
Si besoin, adapter une aiguille

**Fig. 2**

**Purger les bulles d'air** jusqu'à remplir entièrement le bouchon de sang  
Exercer une pression lente sur le piston jusqu'à la butée

**Fig. 6**

**Prélèvement :**  
Tirer doucement le piston pour remplir la seringue avec **1 mL au minimum**

**Fig. 3**

**Agiter la seringue** pendant **au moins 20 secondes** dans les deux axes pour dissoudre l'héparine

**Fig. 7**

**Après le prélèvement :**  
**Bien enfoncer le bouchon** et tourner d'un quart de tour

**Fig. 4**

Analyser l'échantillon dans un délai de **30 min maximum**

**Fig. 8**