



L. E. S. S. FRANCE

1. Conserver la pochette **ouverte** pendant au moins 12 heures au congélateur (**Ne pas congeler en dessous de - 20°C**)
2. Insérer le prélèvement dans le sachet à usage unique et fermer
3. Insérer le sachet à usage unique dans la pochette isotherme réfrigérante dès sa sortie du congélateur et **fermer à l'aide du velcro®**
4. Transporter la pochette isotherme réfrigérante à **température ambiante** dans un sac SPECI-GARD® pour une étanchéité parfaite
5. Positionner la demande d'examens dans la poche extérieure du sachet SPECI-GARD®

**CONSERVER LA POCLETTE ISOTHERME REFRIGERANTE
DANS LE CONGELATEUR**