

GCS BIOLOGIE 85	LABO-FE082	RECHERCHE DE CRYOGLOBULINE- CRYOFIBRINOGENE	Signature de l'approbateur
	Version J		Cindy AUBRET
	Page 1/2		Applicable le 01/08/2024

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL
Laboratoire de biologie, 85925 La Roche-sur-Yon Cedex 9

IDENTITE DU PATIENT

SERVICE :

Prescripteur :

Prélevé le/...../..... à H par

Conduite à tenir pour le prélèvement :

Analyse demandée : ☐ **CRYOGLOBULINE** ☐ **CRYOFIBRINOGENE**

Le patient doit être de préférence à jeun depuis 4 heures (lecture plus difficile en postprandial)

- **Se présenter à la réception du Laboratoire avec ce bon de demande** identifié avec une étiquette patient.
- Le **laboratoire donnera un Travelbag (container isotherme) à 37°C contenant au moins 3 tubes secs sans gel (pour les cryoglobulines) et 3 tubes citratés (pour les cryofibrinogènes).**
- Une fois le prélèvement effectué (rapidement pour que le travelbag reste à 37°C), **les 3 (ou 6) tubes identifiés** seront replacés directement **dans le Travelbag** qui sera **retourné au Laboratoire le plus rapidement possible** (1 heure maximum) accompagné de ce bon

Cas particulier : sites distants (ex Montaigu) : Prévenir le laboratoire la veille pour organiser le prélèvement et le transport (cf guide des analyses : délai global de transport de 6h aller retour)

Cadre ci dessous réservé au laboratoire

Préanalytique :

Tubes mis à l'étuve à 37°C+/- 3 le ____/____/____ à ____ h ____ par : ____

A centrifuger (2 x 2200 g 15mn à 37°C+/-3) le ____/____/____ entre ____ h ____ et ____ h ____

Centrifugation et décantation effectuées le ____/____/____ à ____ h ____ par : ____

Tube 1 : volume : ____

Tube 2 : volume : ____

Recherche

	J7
Date	
Opérateurs	
Résultat cryoglobuline.	
Résultat cryofibrinogène.	

Aspect du sérum inchangé noter (-)

Apparition d'un précipité ou d'une gélification du sérum noter (+)

	opérateur	Date	Volume solution utilisée
Lavages (x3)			
Redissolution			

GCS BIOLOGIE 85	LABO-FE082	RECHERCHE DE CRYOGLOBULINE- CRYOFIBRINOGENE	Signature de l'approbateur
	Version J		Cindy AUBRET
	Page 2/2		Applicable le 01/08/2024

Résultat du dosage : résultat brut

Si Identification : (joindre le gel)

résultat corrigé

La version électronique fait foi